



FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Adaptador de transição Enfit 2

Código: TRN-202, TRN-203, TRN204

Anvisa: 81325540027

Descrição: Os adaptadores de transição são produtos não estéreis compatíveis com dispositivos enterais. Facilitam a compatibilidade entre dois dispositivos onde um possui entrada ENFIT e o outro não.

Código	Conexão
TRN-202	Fêmea Cateter para Fêmea ENFIT®
TRN-203	Porta em Y Fêmea para Fêmea ENFIT®
TRN-204	Porta em Y (porta média rígida) Fêmea para Fêmea ENFIT®

Composição: Termoplástico Grau médico, PVC e tinta compatível com termoplástico Grau médico.

Especificações

Dimensão: Não aplicável.

Tamanhos: Único

Uso: Descartável

Cor: Diversos

Embalagem: Unitária

Instrução de uso:

Indicação de uso: Os adaptadores de transição enteral destinam-se a facilitar os conectores enteral específicos entre os conectores compatíveis com AAMI / CN3 (PS) e os conectores entéricos legados não compatíveis com ISO 80369-1.

Princípio de funcionamento: Os adaptadores de transição ENFIT consistem em um adaptador ENFIT fêmea conectado a um conector legado ou enfit. O conector é conectado a um conjunto de alimentação ou dispositivo de alimentação enteral que não é compatível com ENFIT. Assim que o dispositivo estiver conectado, o dispositivo compatível com ENFIT pode ser usado. O dispositivo está disponível em uma ampla gama de opções de conexão, incluindo macho adaptador fêmea de cateter para Fêmea Cateter para Fêmea ENFIT®, Porta em Y para Fêmea ENFIT® e Porta em Y (porta média rígida) para Fêmea ENFIT®.

Os adaptadores de transição devem ser usados por pacientes idosos, adultos, adolescentes, crianças e bebês. O dispositivo auxilia na canalização de nutrição enteral para pacientes com uma variedade de condições médicas que causam incapacidade de manter um estado nutricional adequado.

Modo de uso: 1. Verificar se existem danos nos conteúdos. Se danificado não utilizar. Obter outra embalagem. 2. Utilizar o adaptador incluído para ligar um conector AAMI/CN3 (PS) compatível com conector entérico existente não compatível com a ISSO 80369-1. Aparafusar o adaptador no sentido dos ponteiros do relógio para prender os conectores ENFIT® em conjunto. O cateter e os conectores luer ajustam-se à compressão.

AVISO: Se o adaptador não estiver corretamente colocado e bloqueado, podem ocorrer fugas. Durante a ligação, aplicar força suficiente nos adaptadores para conseguir uma ligação segura. Não apertar demasiado o adaptador para evitar danos nos conectores. 3. O adaptador entérico deve ser retirado após cada utilização. Desparafusar o adaptador ENFIT® no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O cateter e os conectores luer ajustam-se a compressão e podem ser retirados aplicando pressão moderada. 4. Limpar o adaptador com água morna e sabão e enxaguar e secar completamente após cada utilização. Armazenar em local fresco e seco. Nunca utilizar uma máquina de lavar louça para limpar.

Retirar sempre o adaptador de transição do adaptador existente após cada utilização. O adaptador de transição é reutilizável. Dependendo da utilização (frequência, ambiente, etc), pode ser necessária a substituição periódica do adaptador para obter uma funcionalidade ideal. Substituir o adaptador se existirem fugas ou fissuras.

FICHA TÉCNICA

Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. Não reutilizar.

Advertências / Precauções / Contraindicações: Este pacote contém pequenas peças que são um risco potencial de asfixia, se não usadas como planejado. Use sob supervisão apropriada de um adulto. Se o adaptador não for colocado e travado corretamente, pode ocorrer vazamento. Durante a conexão, aplique força suficiente nos adaptadores para fornecer uma conexão segura. Não aperte demais o adaptador para evitar danos aos conectores. O presente adaptador de transição não protege contra ligações erradas acidentais com conectores de aparelhos médicos não entéricos. Apenas para utilização entérica.

OBS: Segundo o fabricante o produto não possui precauções, contraindicações ou efeitos adversos.

Prazo de validade: 3 anos com embalagem intacta. Após aberto utilizar em 30 dias.

Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de
Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP
CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira
CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888LOM68 (8.13255.4)

FM043
Versão 2.0