



## FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Kit Cirúrgico Odontológico N° 01 30G (Péριο)

Código: SB-19380

Anvisa: 81325540032

**Descrição:** Kit destinado a cirurgia odontológica Péριο, para uso único, facilitando o dia a dia do profissional em um só pacote. Produto estéril. Proibido reprocessar. Atóxico. Antialérgico. Repelência a fluídos, água e álcool. Antiestático com baixa liberação de partículas. Resistente a tração e rasgos. Não propaga chamas. Leve, maleável e respirável.

Contém 11 unidades: 2 unidades de toalhas absorventes, 2 unidades de aventais cirúrgicos, 2 unidades de capa de mangueira 2 unidades de capa de refletor, 1 unidade de campo de mesa (70 cm x 90 cm), 1 unidade de campo de mesa impermeável (70 cm x 90 cm), 1 campo fenestrado (1,20 m x 70 cm).

**Composição:** Campo de Mesa, Campo Fenestrado e Capa de Mangueira - TNT de gramatura 30g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno. Avental Cirúrgico 30G e Capa de refletor - TNT de gramatura 30g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno e lastex, Campo de Mesa Impermeável - TNT misto de polietileno e polipropileno. Toalha de Mão - tecido não tecido de poliéster e polietileno.

### Especificações

Dimensão: Conforme o item

Tamanhos: Único

Uso: Descartável

Cor: Branco

Embalagem: 1 Unidade pacote grau cirúrgico

### Instrução de uso:

**Indicação de uso:** Para proteção dos profissionais e do paciente em cirurgias na área odontológica.

**Modo de Uso:** 1. Os profissionais devem proceder a lavagem das mãos. 2. Abrir a embalagem de forma asséptica 3. Secar as mãos com a toalha de mão. 4. Realizar a paramentação cirúrgica com o avental. 5. Realizar as demais outras paramentações como: touca/gorro, sapatilha pro-pé e máscara (NÃO ACOMPANHA O KIT). 6. Colocar luvas estéreis (NÃO ACOMPANHA O KIT). 7. Proteger as mangueiras, o refletor e mesa com os protetores específicos. 8. Proteger o paciente com o campo fenestrado. 9. Após uso proceder o descarte em local apropriado.

**Condições de Armazenamento / Transporte:** Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

**Condições de Manipulação:** Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

**Advertências / Precauções / Contraindicações:** Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

**Prazo de validade:** 2 anos a partir da data de fabricação

**Fabricado e distribuído por:**  
Medical Log Comercio e Indústria de  
Produtos Médicos Ltda  
CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP  
CEP 13.187-065  
Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira  
CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)

FM043  
Versão 2.0