



FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Kit Cirúrgico Implante 30G

Código: SB-19396

Anvisa: 81325540033

Descrição: Kit destinado a cirurgia odontológica Implante, para uso único, facilitando o dia a dia do profissional em um só pacote. Produto estéril. Proibido reprocessar. Atóxico. Antialérgico. Repelência a fluídos, água e álcool. Antiestático com baixa liberação de partículas. Resistente a tração e rasgos. Não propaga chamas. Leve, maleável e respirável.

Contém 15 unidades: 2 unidades de toalhas absorventes, 2 unidades de aventais cirúrgicos, 2 unidades de capa de mangueira, 2 unidades de capa de refletor, 2 unidades de toucas sanfonadas, 2 unidades de máscaras cirúrgicas, 1 unidade de campo de mesa (70 cm x 90 cm), 1 unidade de campo de mesa impermeável (70 cm x 90 cm), 1 campo fenestrado (2,00 m x 1,20 m).

Composição: Campo de Mesa, Campo Fenestrado e Capa de Mangueira - TNT de gramatura 30g/m² 100% polipropileno. Avental Cirúrgico 30G e Capa de refletor - TNT de gramatura 30g/m² 100% polipropileno e lastex, Campo de Mesa Impermeável - TNT misto de polietileno e polipropileno. Toalha de Mão - tecido não tecido de poliéster e polietileno. Máscara Cirúrgica - 2 camadas de TNT 100% polipropileno + 1 camada de Meltblown (camada central) + clipe nasal de polietileno + fio de alumínio e elástico simples de poliéster / elastano. Touca Sanfonada - TNT de gramatura 10g/m² 100% polipropileno e elástico duplo de elastano

Especificações

Dimensão: Conforme o item

Tamanhos: Único

Uso: Descartável

Cor: Branco

Embalagem: 1 Unidade pacote grau cirúrgico

Instrução de uso:

Indicação de uso: Para proteção dos profissionais e do paciente em cirurgias na área odontológica.

Princípio de funcionamento: Atua como barreira mecânica contra respingos nas regiões cobertas do usuário. Evita a contaminação por sujidades no meio ambiente advinda do usuário.

Modo de Uso: 1. Os profissionais devem proceder a lavagem das mãos. 2. Abrir a embalagem de forma asséptica 3. Secar as mãos com a toalha de mão. 4. Realizar a paramentação cirúrgica com o avental. 5. Realizar as demais outras paramentações como: touca/gorro e máscara. 6. Colocar luvas estéreis (NÃO ACOMPANHA O KIT). 7. Proteger as mangueiras, o refletor e mesa com os protetores específicos. 8. Proteger o paciente com o campo fenestrado. 9. Após uso proceder o descarte em local apropriado.

Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação

Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP
CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira
CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)

FM043
Versão 2.0