



## FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Máscara Cirúrgica Tripla Preta MedicalLog

Código: BS-022

Registro Anvisa: 81325540008

**Descrição:** Máscara tripla de uso único, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido) com clipe nasal costurado, com 3 pregas, com fechamento em elástico. Produto não estéril, atóxico, não inflamável, hipoalergênico, apirogênico. Proibido Reprocessar.

**Composição:** 3 camadas no total, sendo duas camadas de TNT e uma camada de filtro de alta densidade.

### Especificações

**Dimensão:** Corpo: 17 cm (comprimento) x 9 cm (largura).

**Tamanhos:** Único

**Uso:** Descartável

**Cor:** Preta

**Embalagem:** Caixa com 50 unidades

### Instrução de uso:

**Indicação de uso:** Ideal para proteção e segurança do usuário contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e patologias causadas por bactérias, que possam atingir as vias respiratórias através da boca e nariz. Proteção contra a projeção ao ambiente de fluídos da boca e nariz.

**Princípio de funcionamento:** Possui 3 camadas, uma camada de filtro de alta densidade no meio que garante isolamento bacteriológico ao filtrar o ar do ambiente. E outras duas camadas (interna e externa) de tecido não tecido (TNT) que proporcionam resistência a máscara e proteção contra fluidos corporais internos e externos.

**Modo de Uso:** Abrir a embalagem. Retirar uma unidade de máscara da embalagem. Abrir a máscara de forma asséptica em que os elásticos fiquem para trás. Proceder o fechamento do elástico atrás da orelha. Ajustar as pregas no rosto. Após uso proceder o descarte em local apropriado.

**Condições de Armazenamento / Transporte:** Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

**Condições de Manipulação:** Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

**Advertências / Precauções / Contraindicações:** Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. Não reutilizar.

**Prazo de validade:** 2 anos a partir da data de fabricação

### Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP  
CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira  
CRF/SP 56268

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)