



## FICHA TÉCNICA

Página 1 de 1

**Nome do produto:** Máscara Cirúrgica Tripla MedicalLog

**Código:** BS-007

**Descrição:** Máscara tripla de uso único, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido) com laudo BFE aprovado com taxa de filtração > 95% de eficiência bacteriológica, costurado, com 3 pregas, com fechamento em cordão. Produto não estéril, atóxico, não inflamável, hipoalergênico, apirogênico. Proibido Reprocessar.

**Composição:** 3 camadas de Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno, com camada do meio de filtro meltblown.

### Especificações:

**Dimensões:** Corpo: 17 cm (comprimento) x 9 cm (largura).

**Tamanhos:** Único.

**Uso:** Descartável.

**Cor:** Branco

**Embalagem:** Caixinhas com 50 unidades.

### Instrução de Uso:

**Indicação de uso:** Ideal para proteção e segurança do usuário contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e patologias causadas por bactérias, que possam atingir as vias respiratórias através da boca e nariz. Proteção contra a projeção ao ambiente de fluídos da boca e nariz.

**Princípio de funcionamento:** Possui 3 camadas, uma camada de filtro de alta densidade no meio, que garante isolamento bacteriológico ao filtrar o ar do ambiente. E outras duas camadas (interna e externa) de tecido não tecido (TNT) que proporcionam resistência a máscara e proteção contra fluidos corporais internos e externos.

**Modo de Uso:** Abrir a embalagem. Retirar uma unidade de máscara da embalagem. Abrir a máscara de forma asséptica, em que as tiras fiquem para trás. Proceder o fechamento das tiras atrás da cabeça, na altura do nariz e na altura do queixo, em forma de laço. Ajustar as pregas no rosto. Após uso proceder o descarte em local apropriado.

**Condições de Armazenamento / Transporte:** Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

**Condições de Manipulação:** Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

**Advertências / Precauções / Contraindicações:** Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. Não reutilizar.

**Prazo de validade:** 2 anos a partir da data de fabricação.

### Fabricado e distribuído por:

**Medical Log Comercio de Produtos Médicos Eireli**

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Débora Rodrigues Gazeta – CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)

Anvisa nº 81325540008