



FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Avental Cirúrgico MedicalLog Código: SB-2093 Registro Anvisa: 81325540007

Descrição: Avental de uso único, confeccionado em SMS com filtração bacteriológica, costurado, com gramatura de 50 g/m², com gola cirúrgica (redonda), manga longa com corte normal, punho de malha canelada, com fechamento em velcro (altura da pescoço) e tiras nas costas (altura da cintura). Possui cartão para transferência asséptica. Dobrado de forma asséptica. Produto estéril, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, apirogênico. Repelente a água e álcool. Possui dupla embalagem e toalha de mão. Proibido Reprocessar.

Composição: SMS com barreira bacteriológica de gramatura 50g/m².

Especificações

Dimensão: 1m e 25cm (Comprimento) x 1m e 75cm (Largura)

Tamanho: G

Uso: Descartável

Cor: Azul

Embalagem: Pacote grau cirúrgico com 01 unidade de avental e 01 toalha de mão (com segunda embalagem)

Instrução de uso:

Indicação de uso: Indicado para cirurgias, em que há proteção física e bacteriológica por parte do usuário e paciente.

Modo de Uso: 1 Abra a embalagem primaria do avental, colocando sobre a mesa. 2 Abra o invólucro sobre a mesa de forma a expor a toalha de mão. 3 Com as mão lavadas e secas de forma asséptica com a toalha de mão absorvente. Descartar a toalha em local apropriado. 4 Posicionar as mãos dentro das mangas do avental sobre a mesa, com as mãos encaixadas trazer o avental nas alturas dos ombros. 5 Forçar a entrada das mãos na abertura das mangas de forma que o avental abra. Não encostar em objetos, chão e paredes. 6 Um auxiliar deve realizar o fechamento do avental, puxando pela lapela até ajuste das mangas e ombros. O mesmo deve acionar o velcro e em seguida fechar com as fitas traseiras. 7 Colocar luvas estéreis de forma asséptica, de forma que cubra o punho de malha com as luvas. 8 Para o fechamento final frontal, o tag que está posicionado na frente com duas fitas será retirado. A fita do lado esquerdo, o profissional que está usando o avental deve retirá-la. Para liberar a outra fita, o seu auxiliar que estará posicionado a sua esquerda procede um giro para a direita. Segurar a ponta da fita em que está presa o tag, o auxiliar deve puxar o tag e o profissional deve com as duas pontas das fitas, proceder um laço.

Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. A esterilidade se mantém somente com a embalagem fechada e intacta. Não reutilizar. Não re-esterilizar.

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP
CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira
CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)

FM043
Versão 2.0